

<b>1 Domaine d'application</b>	Ce document décrit la procédure de collecte d'une biopsie pour analyse bactériologique (inclus placenta, os...)
<b>2 Documents associés</b>	C2-PR01 Manuel de prélèvement
<b>3 Responsabilité</b>	Prélèvement réalisé par/ sous la supervision d'un personnel habilité
<b>4 Contact</b>	Laboratoire du Centre Hospitalier de l'Ouest Guyanais

*Seule la version électronique fait foi*

## 5 Méthodologie



### **FLACON A BILLES (BMT S TUBE)**

Objectif: **analyse bactériologique des BIOPSIES (os, tissu)**

Précautions:

1. Gants stériles
2. Insérer la biopsie aseptiquement
3. Etiqueter prélèvement, renseigner nature et origine, traitement antibiotique en pré-per –post...
4. Transport rapide au laboratoire (même en astreinte=urgent)

**SEUL FLACON ACCEPTE pour l'analyse BACTERIOLOGIQUE d'une BIOPSIE**

**NE CONVIENT PAS A L'ANATOMOPATHOLOGIE**